

# LE BANDEAU PEAU A PEAU

## LA PROXIMITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Le bandeau de peau à peau KODODO® est destiné aux bébés de petit poids (4 kg maximum). Il se porte comme un "top", est disponible en tailles S, M, L, XL, XXL, et est utilisé en néonatalogie, dans les chambres mères enfants, ou en maternité.

Le nouveau né est installé en peau à peau selon la méthode développée dans le guide OMS "la méthode mère kangourou, guide pratique"

Le contact rapproché mère enfant, " peau à peau " contribue à l'apaisement des bébés qui retrouvent ainsi des repères connus (bruits du coeur et odeur maternels). Il permet le maintien de la température du nouveau né et facilite l'allaitement à la demande.

En position verticale, entre les seins de la maman, poitrine contre poitrine, ses jambes écartées en grenouille. La tête du bébé est tournée sur le côté dans une position étendue. Le haut du bandeau arrive au niveau des lobes d'oreilles. Cette position légèrement étendue permet d'éviter une obstruction des voies respiratoires et assure un contact oculaire entre la maman et son bébé. Il faut éviter les flexions et les postures en extension.

Le bon positionnement dans un bandeau de taille adapté permet de garder le nouveau né ainsi plusieurs heures par jour. La maman peut manger, lire ou faire toute autre activité tant que le bébé est bien maintenu dans son bandeau. L'habitude est vite prise et le bébé peut téter à sa demande.



**KODODO**

le lien maman-bébé, confort et sécurité

# LE BANDEAU PEAU A PEAU

## LA PROXIMITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Le bandeau de portage facilite la pratique du peau à peau dans les services de néonotologie, "unités kangourou" et maternité.

Par la proximité mère-enfant ainsi induite, il favorise le contact multi-sensoriel mère-enfant et facilite l'allaitement.

Correctement positionné selon la méthode "mère-kangourou" décrite dans le guide pratique OMS 2004, l'enfant est stimulé par les mouvements de sa mère et présente une bonne stabilité respiratoire.

### Consignes de sécurité:

Ne pas dépasser le poids maximal de 4 kg / Respecter la bonne taille des bandeaux. N'utiliser le bandeau KODODO® que si le bébé a son autonomie respiratoire. **L'adulte qui porte son bébé en bandeau de peau à peau doit toujours rester en position semi-assise**



Matières :  
coton 92% Elastan 8%

Consignes de lavage :



Tenir compte de la taille avant grossesse pour choisir la taille du bandeau.

	Taille Femme	Tour de Taille	Poids Femme (kg)	Tour poitrine
S	38	72/76	50/55	88/92
M	40	76/80	55/60	92/96
L	42	80/84	60/65	96/100
XL	44	84/88	65/70	100/104
XXL	46	88/92	70/75	104/108

Contact@kododo.fr  
+33(0)3.28.16.09.66

Parc Eurasanté 310 rue Jules Vallès  
59120 LOOS  
www.kododo.fr



**KODODO**

le lien maman-bébé, confort et sécurité